



## SILKPEEL® / DERMOLISSAGE™ RENSEPROCEDURE

### EFTER ENDT BEHANDLING

1. Fjern den tomme solution flaske fra forgreningsrøret til forsyningsvæsken og fjern behandlingshovedet. Rens behandlingshovedet i OptiCide3 i minimum 5 minutter eller autoklave ved 132° C i 5 minutter.
2. Placer den blå renehætte på behandlingshovedet.
3. Hvis du har en DermoLissage® drej Treat/Disinfect knappen mod uret så den peger på "Disinfect" Indsæt desinfektion solution i forgreningsrøret. BRUG IKKE VAND!
4. Indstil knapperne for vakuum og flow til deres maksimale indstillinger ved at dreje begge knapper helt til højre (med uret).
5. Lad OptiCide3 solution løbe gennem systemet indtil flasken er tom.
6. Lad maskinen køre og lad luft løbe ind i slangen i ca. 30 sekunder.



Trin 1



Trin 2



Trin 3



Trin 4



Trin 5



Trin 6

KORREKT RENGØRING ER VIGTIG I FORHOLD TIL DINE KUNDERS HELBRED OG FOR AT FORLÆNGE LEVETIDEN PÅ DIN MASKINE. HVIS RENGØRINGSINSTRUKTIONER IKKE FØLGES, VIL DETTE PÅVIRKE GARANTIEEN PÅ MASKINEN.



## SILKPEEL® / DERMOLISSAGE RENSEPROCEDURE

### EFTER ENDT ARBEJDS DAG

1. Fjern den tomme solution flaske fra forgreningsrøret til forsyningsvæsken og fjern behandlingshovedet. Rens behandlingshovedet i OptiCide3 i minimum 5 minutter eller autoklave ved 132° C i 5 minutter.
2. Placer den blå renehætte på behandlingshovedet.
3. Hvis du har en DermoLissage® drej *Treat/Disinfect* knappen mod uret så den peger på "DISINFECT" Indsæt desinfektion solution i forgreningsrøret. BRUG IKKE VAND!
4. Indstil knapperne for vakuum og flow til deres maksimale indstillinger ved at dreje begge knapper helt til højre (med uret).
5. Lad OptiCide3 solution løbe gennem systemet indtil det når håndstykket og begynder at løbe ned i affaldsbeholderen.
6. Når væsken begynder at løbe ned i beholderen sluk enheden og løs affaldsbeholderen for at udligne vakuum. Lad desinfektionsvæsken blive i slangen til næste behandling.

#### Før næste behandling:

1. Fastgør affaldsbeholderen og tænd for maskinen. Lad den køre til alt desinfektionsvæsken er løbet gennem maskinen.
2. Lad maskinen køre og lad luft løbe ind i slangen i ca. 30. sekunder.
3. Sluk for maskinen.
4. Tøm affaldsbeholderen og fastgør den igen til forgreningsrøret. Du er nu klar til at udføre en behandling.
5. Hvis du har en DermoLissage®, drej *Treat/Disinfect* knappen med uret mod "Treat".



Trin 1



Trin 2



Trin 3



Trin 4



Trin 5



Trin 6

KORREKT RENGØRING ER VIGTIG I FORHOLD TIL DINE KUNDERS HELBRED OG FOR AT FORLÆNGE LEVETIDEN PÅ DIN MASKINE. HVIS RENGØRINGSINSTRUKTIONER IKKE FØLGES, VIL DETTE PÅVIRKE GARANTIE PÅ MASKINEN.